

FORA®

iFORA MP 健康雲服務 帳號申請指南



福爾係經美商 Foracare Inc. 監製，
並授權商標使用與販售。

藥商名稱: 泰博科技股份有限公司
藥商地址: 新北市五股區五工二路127號6樓
製造廠名稱: 泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址: 新北市五股區五工二路127號B1-7樓
福爾台灣網址: www.foracare.com.tw
客戶服務專線: 0809-007-868 [週一 ~ 週五 9:00-18:00]
其它時間, 請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。




下載與安裝 APP



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



註冊帳號

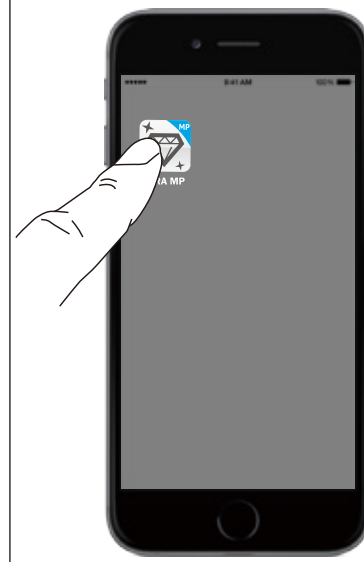

開啟APP
註冊使用者帳號



點選【個人設定】



點選【遠距照護服務】



台灣: 【ForaCare Taiwan】
香港: 【ForaCare Hong Kong】

本說明書僅供參考，最新版本請至
http://www.foracare.com.tw/download/iFORA_MP_registration_user_guide.pdf



點選【註冊】



點選【註冊新帳號】



填寫個人資料



點選【建立】



出現「註冊成功」提示後
點選【確認】



註冊成功後，APP會自動
填入機器序號。




點選【註冊儀器】
(綁定藍牙設備序號)



出現「註冊成功」提示後
點選【確認】



點選【個人設定】

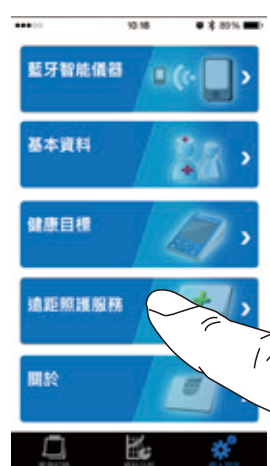

點選【遠距照護服務】



點選【上傳】




32筆資料已上傳

開始上傳量測資料



32筆資料已上傳

資料上傳成功後，點選【確定】離開

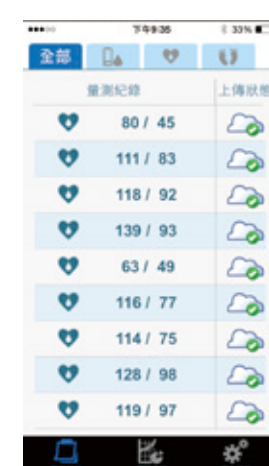

上傳狀態：
表示上傳iFORA 健康雲