
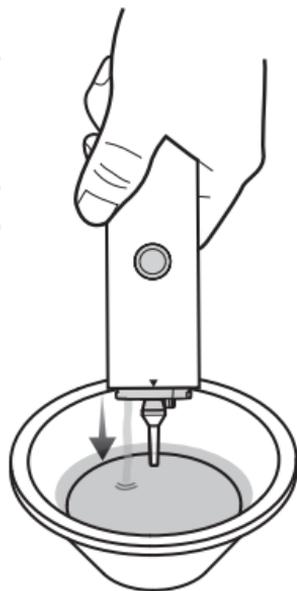
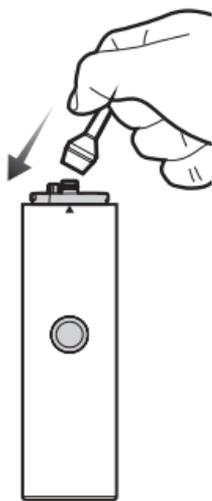
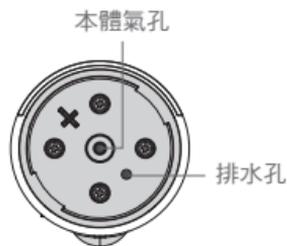


一般清潔

每次使用完畢後請馬上清洗矽膠吸嘴、吸引器及收集杯，避免鼻涕乾掉卡在矽膠嘴內或收集杯中，請參見說明書清潔與維護程序清洗。

特別清潔

吸引鼻涕過程中，如分泌物進入收集杯細管內(下圖虛線框處)，請在本體氣孔處裝上較長的吸嘴，啟動開關，置入水盆內，機器會開始吸水，再透過旁邊的排水孔排出，維持清洗循環90秒以上，即可離開水面，請先不要關閉機器，待機器將水排乾之後，再關閉，並用乾布擦拭周圍。

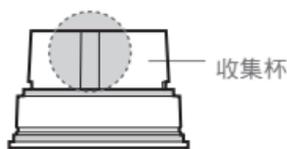

請注意：
機器本體請勿浸泡水。