測量物體表面溫度


步驟二


取下探頭保護蓋



步驟三

到螢幕出現表示物體表面溫度

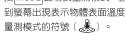

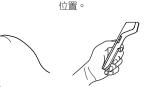

將溫度感測探頭垂直靠近受測

物體(執行測量的距離為3~7

公分);或對準要測量的空間

再按一次()鍵,聽到"嗶"聲即完成測量,結果即會顯示於螢 幕上,此時螢幕上會出現藍牙符號,表示機器正在進行資料傳



於物體表面溫度量測模式下進行測試,結果可能伴隨著以下提示

測量結果	螢幕背光	螢幕提示	蜂鳴音提示
0 ~ 100°C	緑色	無	2短音
≥ 100.1°C	無	H,	2短音
< 0.0°€	無	! =	2短音

請注意

- •在物體表面溫度量測模式下,您可按住 鍵不放進入 連續量測模式,當螢幕出現閃爍的 HOLD 符號時,表示您 可連續測量。
- •當機器閒置60秒後將會自動關機

檢閱記憶

本產品可儲存30筆測量結果。

進入記憶模式

按一次(1)鍵開啟



按一次 MEMORY 鍵進入記憶模式, 此時螢幕會出現閃爍的記憶符號 並顯示最近一次的測試結果。




檢閱機器內儲存的測試結果

進入記憶模式後,您可按一下 MODE 鍵或 MEMORY 鍵瀏覽過 去的測試結果

測試結果將同時顯示量測模式符號

⟨ 成人額溫、♥ 兒童額溫、♥ 物體表面溫度

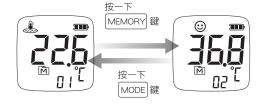

離開記憶模式

按()鍵進入測量模式或閒置60秒機器將會自動關機。

請注意:

當記憶筆數超過30組時,最新加入的紀錄會自動取代最久 的歷史紀錄。

故障訊息排除

下表為您在操作機器的過程中可能遇到的問題,若您依據解決 方法執行仍無法排除問題時,或機器所顯示的訊息不在下列表 中,請勿嘗試自行解決,請直接與經銷商聯絡。

螢幕顯示	可能原因	解決方法	
E-1	環境溫度超出	請在10°C至40°C (50°F至104°F)的	
E-5	範圍	環境溫度下操作機器。	
	電池電壓過低	請盡快更換新的電池。	
E-4	機器內部發生錯誤	請重新測試一次。 若仍無法解決問題, 請與當地經銷商聯繫。	
Н,	當測量結果超出	請詳細閱讀說明書	
Lo	可測量範圍時	重新測試一次。	

製造廠名稱:泰博科技股份有限公司五股廠 製造廠地址:新北市五股區五工二路127號B1-7樓

藥 商 名 稱:泰博科技股份有限公司

藥 商 地 址:新北市五股區五工二路127號6樓

免付費客服電話: 0809-007-868 [週一~週五09:00-12:00 | 13:30-18:00] 其它時間,請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。

產品規格

型號	TD-1242B
尺寸及重量	155.46(L) x 40.14(W) x 39.45mm (H), 61.8g(不含電池)
電源	2 顆 1.5 V AAA 鹼性電池
人體額溫 測量範圍	32°C ~ 43°C(89.6°F ~ 109.4°F)
物體表面溫度測量範圍	0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F)
解析度	0.1°C / 0.1°F
準確度 (人體額溫 測量模式)	±0.2°C(±0.4°F),35.0°C(95.0°F) 至 42.0°C(107.6°F) ±0.3°C(±0.5°F),< 35.0°C(95.0°F) 或 > 42.0°C(107.6°F)
準確度 (物體表面溫度 測量模式)	±1°C (±2°F)
溫度單位	℃或°F
傳輸介面	藍牙傳輸
操作環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
操作環境濕度	相對溼度85%以下,無凝結
保存環境溫度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
保存環境濕度	相對溼度85%以下
記憶筆數	30筆

版本1.0 發行日:2019-06 311-1242200-001

FORA IR42

福爾紅外線額溫槍 FORA Infrared Forehead Thermometer

使用說明書



型號:TD-1242B 衛部醫器製字第006076號 使用之前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用。

親愛的使用者 您好

感謝您購買福爾紅外線額溫槍。請使用包裝內所附的保證卡與 經銷商註冊,以便日後維修與售後服務。若您對本產品有其他 疑問,請直接連絡當地經銷商或是購買地點。

預期用途

本產品採用紅外線量測技術測得人體額頭溫度。適用於間歇性 測量人體體溫。本產品亦可偵測物體表面溫度。(測量物體表面 溫度非屬醫療效能)

注意事項

- •使用之前,務必檢查溫度感測探頭部位的清潔,必要時,請使 用乾淨、乾燥的棉花棒擦拭並清潔內側的探頭。
- ·人體溫度無絕對標準值,請於日常測量並記錄正常體溫值,在 懷疑發燒時請將測量結果與平時個人的正常範圍告知醫師,並 **中醫師進行發燒的判斷。**
- •人體各部位的溫度各有不同,因此在不同部位測得的體溫數值 不應直接比較。
- •對測量結果請勿自我判斷和治療,請諮詢並遵照醫生指示。
- ·避免機器摔落及用力碰撞,若不慎掉落且溫度計疑似已受損 請暫停使用並聯絡客戶服務部門。
- ·請勿自行拆卸、修理和改造機器,否則可能導致測量結果出現 誤差或引起機器故障。
- ·本產品無防水功能。使用時請小心,避免任何液體進入。
- ·請使用柔軟、乾燥的布擦拭機器外部。
- •請將機器存放在涼爽、乾燥的地方。遠離灰塵,避免陽光直射 或暴露於高溫下。
- ·使用完畢後,請蓋上探頭保護蓋。
- ·應隨時採取基本的安全防護措施,特別是使用於兒童、行動不 便人士或在其附近使用時。
- •使用傳輸功能之前,請先確認機器與藍牙接收裝置已完成配對 , 日在藍牙傳輸範圍之內。

產品外觀

■ 温度感測探頭



4 探頭保護蓋

5 MODE 鍵

6 MEMORY 鍵

7 電池蓋

1098

<u>─ॣॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॗॣॗॣॗॣॗॗॣ</u>

顯示螢幕

1 物體表面測量模式

2 錯誤訊息/警示符號

3 查閱歷史記錄

4 連續測量模式

5 温度單位

6 測量結果顯示區

7 電量顯示

8 藍牙符號

9 成人額溫測量模式

10 兒童額溫測量模式

電池安裝方式

步驟二

步驟四

掀開電池蓋。

本產品使用2顆1.5V AAA 鹼性電池。請您遵循以下步驟進行電 池安裝。

依圖示箭頭指示方向將



步驟三

將新的電池置入電池槽中 並請注意電池正負極。





電池正確安裝後,蓋上電池蓋

請注意:


- •遠離幼小的孩童,避免吞食。如不幸吞食,請立即尋求醫 牛的協助。
- 請勿使用劣質或過期電池,以避免造成量測誤差。
- •長時間(約3個月)不使用儀器,建議您將電池取出,以 免電池內的化學物質滲漏。
- 丟棄使用過的電池時請遵守當地的法令規定。

溫度單位切換

本產品提供°C(攝氏)及°F(華氏)兩種測量溫度單位的選擇


步驟一

在關機狀態下,長壓 MODE 鍵約1秒。

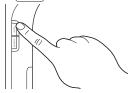

步驟二

當機器螢幕出現閃爍的溫度單位符號時,您可再按MODE)鍵 選擇您想要的溫度單位。

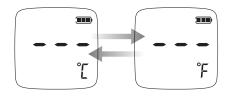

步驟三

選定後按一次(「)鍵,機器螢幕會顯示OFF,表示設定已完成 機器會自動關機;或閒置60秒機器將自動關機



開始測量

本產品有多種量測模式可供選擇,可測得人體額頭溫度及物體 表面溫度。

若您想要切換量測模式,請於開機後,按MODE)鍵選擇您想要 的量測模式(₹成人額溫/⊙兒童額溫/€物體表面溫度)。 請您務必確認選擇的模式是否符合您的需求。


測量人體額頭溫度

步驟一

取下探頭保護蓋。

步驟二

將溫度感測探頭垂直靠近前額。 執行測量的距離為3~7公分。

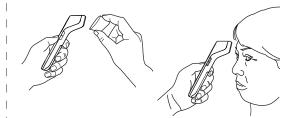

步驟三

按一次(1)键,聽到"哩"聲即完成測量,結果即會顯示於螢幕 上,此時螢幕上會出現藍牙符號,表示機器正在進行資料傳輸。



蜂鳴音提示 測量結果 螢墓背光 營幕提示 38.0 ~ 43.0°C 紅色 閃爍的警示符號 ▲ 1長音+3短音 2短音 32.0 ~ 37.9°C 2短音 > 43.0°C < 32.0°C 2短音 n 於兒童額溫量測模式下進行測試,結果可能伴隨著以下提示: 測量結果 **峰鳴音提示 谷菓背**半 營幕提示

於成人額溫量測模式下進行測試,結果可能伴隨著以下提示

閃爍的警示符號 ▲ 1長音+3短音 37.7 ~ 43.0°C 32.0 ~ 37.6°C 2短音 2短音 > 43.0°C < 32.0°C 2短音 L O

請注意:

- •建議至少量測3次,並取測量到之最高值。
- •本產品採用非接觸式測量。前額測量時,由於皮膚狀況容 易受到汗水、出油和外部環境等影響,溫度讀值僅供參考。
- •如果溫度感測探頭放置的位置與額頭測量位置形成角度 則讀取值可能會受到環境溫度的影響。
- 應盡量避免運動後或入浴後30分鐘內進行量測。
- •建議於室內使用,且避開陽光直射或冷暖氣機出風口。
- •當受測者所處的環境溫度發生較大溫度變化時,受測者需 要身處該環境大於10分鐘以上,以確保額頭溫度穩定。
- •當機器閒置60秒後將會自動關機