

FORA[®] TM10

福爾穿戴式電子體溫計 Wearable Temperature Monitor

使用說明書



型號: TD-1035
VER. 2.0 2017/11

衛部醫器製字第005463號

操作步驟


- 您可以透過藍牙，將電子體溫計所測得的量測結果，傳輸至您的智慧型手機或電腦。

步驟一 請先至App Store或Google Play下載iFORA BM APP

步驟二 將您欲接收資料的裝置的藍牙功能開啟，當電子體溫計螢幕上出現藍牙指示符號，表示已建立藍牙連接。



步驟三 幫寶寶正確配戴電子體溫計，將腋下以乾毛巾擦拭後，將電子體溫計穿戴於接近腋窩處，並調整臂帶的位置，確保溫度感測器是緊貼在腋窩的(如下圖箭號所指之紅點位置)

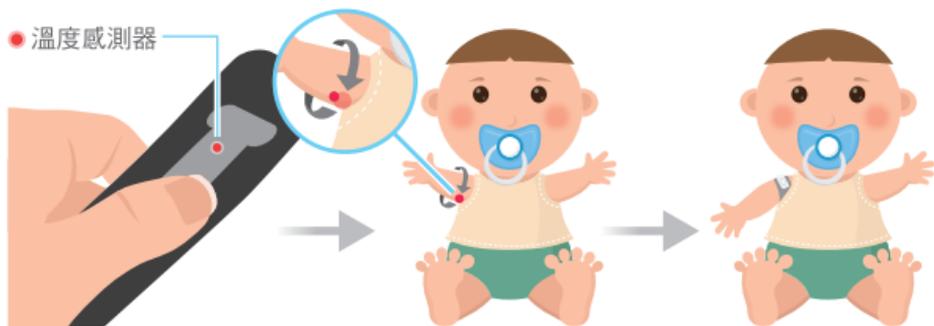

警告與注意事項

- 乾毛巾擦乾腋下後，將電子體溫計穿戴於腋窩處，並調整臂帶的位置，確保溫度感測器緊貼腋窩處。
- 第一次使用本產品前，請先將電池保護墊片移除。
- 運動、移動可能造成量測溫度失準，建議在穩定或睡眠狀態下使用。

前言

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用，請將這份說明手冊留著，供日後隨時參考用。如對於本產品有任何問題，請與您的當地經銷商聯繫。

請用手機掃取條碼，即可觀看完整的產品操作影片
或上<http://www.foracare.com.tw/tm10>



產品用途

本產品為家用醫療器材，用於體溫量測，可即時顯示及監控腋溫測量結果。



警告與注意事項

- 使用體溫計時，正確的操作方法才得以獲得精確的溫度讀數，請在使用前詳細閱讀本手冊。
- 本產品的操作溫度範圍在5°C至40°C之間(41°F至104°F)，相對濕度15%至93%。
- 請將本產品存放在陰涼乾燥的地方，-25°C至70°C(-13°F到158°F)，相對濕度10%至95%。
- 避免摔落本產品，若不慎掉落且認為已經受損，請立即聯絡客戶服務經銷商。
- 請勿自行拆卸本產品。
- 應隨時採取基本的安全防護措施，特別是本產品用於兒童或行動不便人士，或在其附近使用時。
- 本產品的用途不在於取代專業醫師的意見，若您對量測結果有疑慮，請諮詢您的專業醫師。
- 本產品須將電池妥善安置於機器中，以降低被兒童誤吞食的風險。
- 第一次使用本產品時，請先試配戴20分鐘，如有過敏反應或任何不適請立即取下，並諮詢您的專業醫師。
- 本產品所附之臂帶屬消耗品，若因反覆使用而產生異味或無法沾黏的情況，需重新購買。
- 本產品不適用於六個月以下的新生兒。
- 避免陽光直射。

- 必須先進行電子體溫計與您欲接收資料的裝置之間的藍牙配對，並確認電子體溫計是在可接收的傳輸範圍，才可開始進行資料傳輸。
- 本產品藍牙傳輸功能之接受資料裝置，適用於作業系統iOS 7(含)以上、Android 4.3(含)以上。

步驟四 開機量測體溫，按下機器側邊按鍵開啟電子體溫計，即開始量測並顯示體溫。



步驟五 開啟iFORA BM APP，並將本產品透過藍牙與裝置配對，量測得的體溫數據將自動透過藍牙上傳至配對裝置。

藍牙配對&註冊帳號



請用手機掃取條碼，觀看藍牙配對步驟及啟動遠端註冊功能

<http://www.foracare.com.tw/tm10/register/>






Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



請先至App Store或Google Play搜尋並下載【iFORA BM】。

外觀圖示

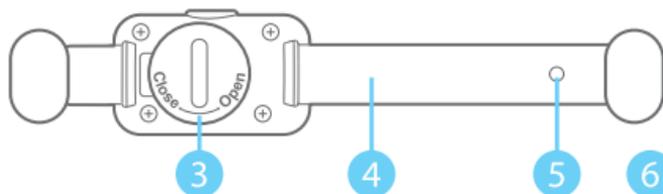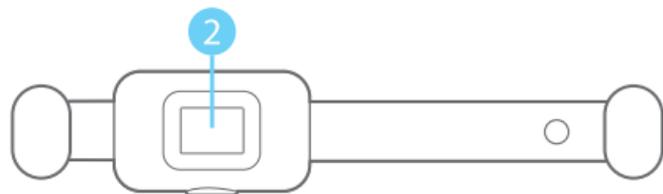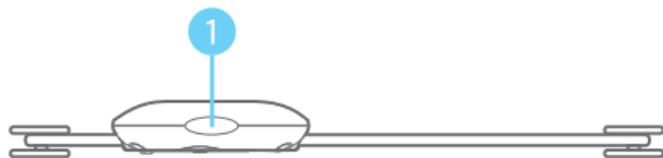

1 ON/OFF 開關

2 顯示螢幕

3 背蓋

4 錶帶

5 溫度感測器

6 臂帶




正面



背面

顯示螢幕

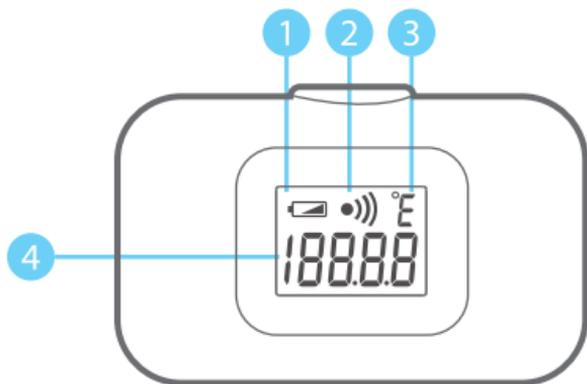

- 1 電量指示
- 2 藍牙訊號指示
- 3 溫度單位
- 4 量測溫度顯示


安裝電池

請注意: 安裝或更換新的電池前, 請先撕起錶帶兩側的固定條, 將體溫計主體從臂帶上卸除。

本機器使用1顆CR2032電池, 當機器顯示“”表示低電量, 請遵循以下步驟更換新的電池:

步驟一

先準備一顆新的CR2032電池, 以及硬幣一枚

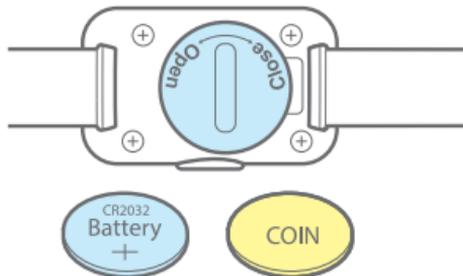


步驟二

將硬幣立於電池蓋凹槽上，
依OPEN箭頭指示方向旋轉，
直到鬆開電池蓋




步驟三

取下電池蓋與舊電池，
依正負極方向指示置入
新電池

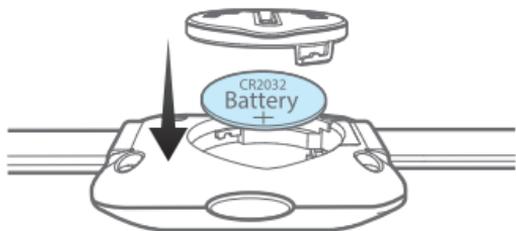

步驟四


依CLOSE箭頭指示方向旋轉，
直到蓋上電池蓋

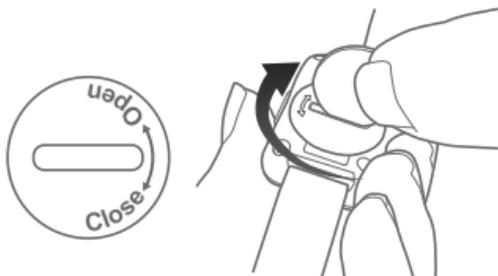


警告與注意事項

1. 雖然電子體溫計出現“”時仍可運作，但仍然建議您更換電池，以獲得準確的量測結果。
2. 若有長時間不會使用電子體溫計，請取出電池。
3. 電池應放置於孩童不易取得之處。若有誤吞食情況，立即就醫。
4. 電池廢棄物請依循當地法規處置。


臂帶更換步驟

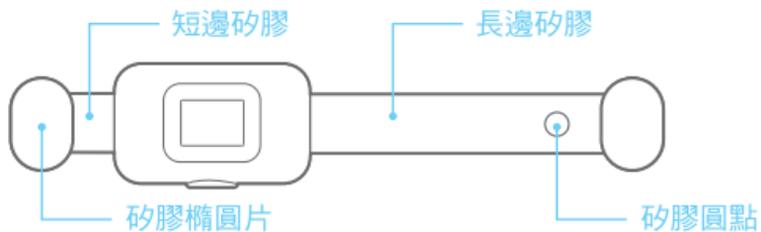

1 將短邊矽膠橢圓片穿入魔鬼氈側的孔中

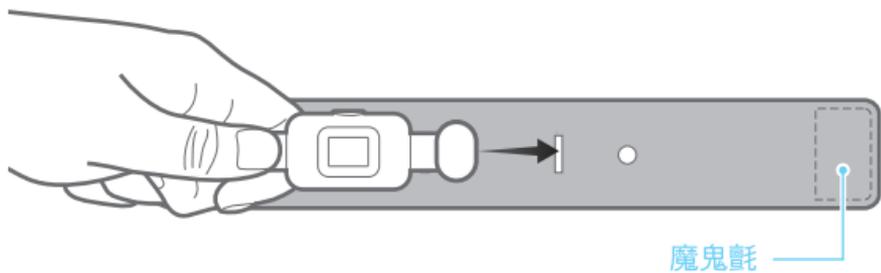


2 如下圖

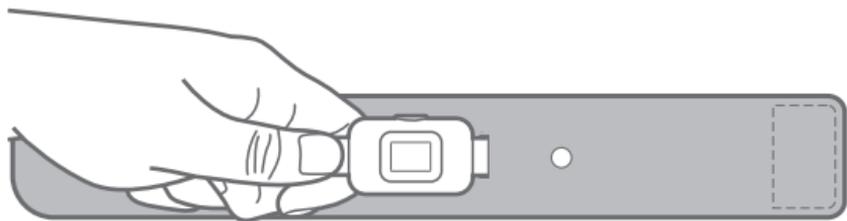


3

將矽膠橢圓片從臂帶反面拉出

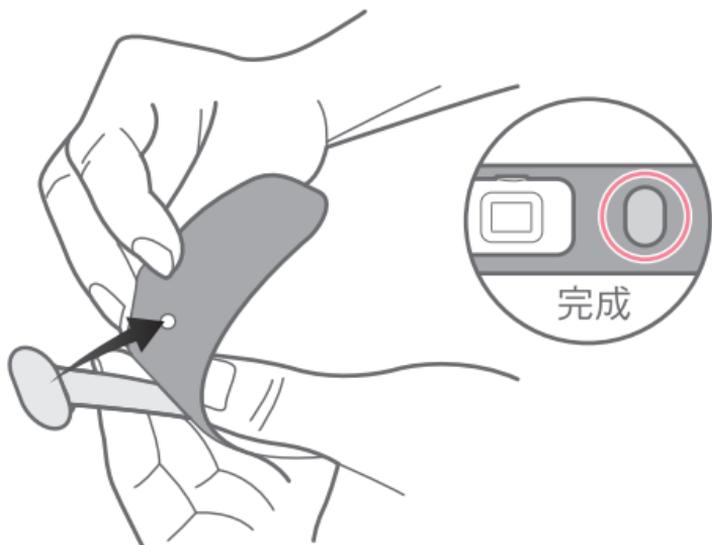


4

將長邊矽膠穿入長型孔內

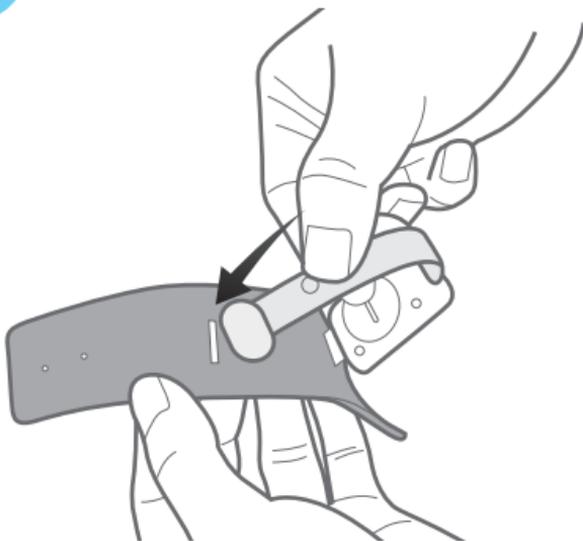

5

矽膠圓點及橢圓片穿入孔中

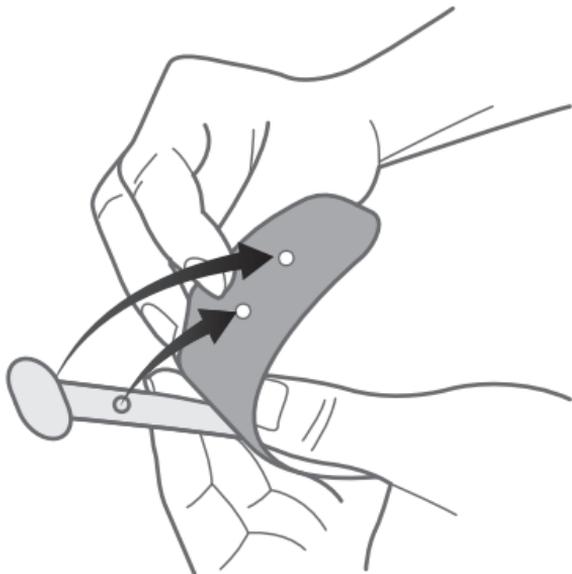

6

完成



★ 臂帶顏色以出貨所附為主

清潔與保存

請注意: 開始清潔體溫計前, 請先撕起錶帶兩側的固定條, 將體溫計主體從臂帶上卸除。

- 請於每次使用後, 使用柔軟且稍微沾濕的布輕輕擦拭本產品外殼及溫度感測器部位。
- 可以使用的酒精棉片擦拭, 切勿使用具有磨粒的清潔劑或其他有機溶劑。
- 體溫計的主體並無防水功能。切勿將之放在水龍頭下方沖洗或浸泡在水中。
- 請將體溫計存放在涼爽、乾燥的地方。遠離灰塵, 避免陽光直接照射。
- 請小心擦拭, 以免刮傷LCD表面。

量測結果顯示

顯示訊息			
代表意義	電量過低	溫度過高, 超出量測範圍	溫度過低, 低於可量測範圍

故障排除指引

可能發生的問題	處理方法
電力耗盡	請更換新電池
電子體溫計無法開機或其他故障	請連繫當地經銷客服

產品規格

型號	TD-1035
尺寸重量	40.5L / 27.5W / 11.7H (mm), 18g
電源	3V CR2032一顆
顯示溫度範圍	20.00°C (68.00°F) ~45.00°C(113.00°F)
解析度	0.01°C / 0.01°F
準確度	20.00°C~34.99°C (68.00°F~94.98°F): ±0.10°C(0.18°F) 35.00°C~38.00°C (95.00°F~100.40°F): ±0.05°C(0.09°F) 38.01°C~45.00°C (100.42°F~113.00°F): ±0.10°C(0.18°F)
溫度單位	°C / °F
操作環境溫度	5°C 至 40°C (41°F至104°F)
操作環境濕度	相對溼度15%~93%
保存環境溫度	-25°C至70°C (-13°F至158°F)
保存環境濕度	相對溼度10%~95%
資料傳輸	藍牙



製造廠名稱：泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：新北市五股區五工二路127號B1-7樓
藥商名稱：泰博科技股份有限公司
藥商地址：新北市五股區五工二路127號6樓

本說明書僅供參考，最新版本請至 http://www.foracare.com.tw/download/iFORA_TM10_user_guide.pdf